

國立和美實驗學校

移位輔具介紹 ---- 移位機

輔具類別	輔具項目	圖 片	說 明
移位輔具	移位機		<p>一、功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助學生轉位移動，帶輪移動式主機，可從床上至輪椅、浴廁，或移位至地板上等等 2. 避免照顧者腰背受傷，保護照顧者與被照顧者的安全 3. 照顧者可單人操作完成移位工作 <p>二、規格</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主機材質：鋁合金材質。 2. 承載重量：205 公斤(含)以上。 3. 操控模式:採用紅外線無線手控制器及機上開關兩種模式。 4. 手控制器：紅外線無線控制器 5. 電動可調式升降高度。 6. 電動可調式底座。 7. 電池充電器具有三種燈號，按壓後可顯示剩餘存量(以燈號表示)。 8. 具低電量提示燈及提示音。 9. 緊急下降裝置(機械式及電子式)。 10. 輪子： 漏斗型雙拼輪(75mm)，後輪可固定止滑。 11. 懸吊掛桿：安全扣鎖式，預防未掛妥綁帶而滑落的現象。

國立和美實驗學校

移位輔具介紹 ---- 移位機

移位輔具	移位機		<p>配件如下： 如廁高背式懸吊帶一條 尺寸：S、M 懸掛點：6 點式。 適合重量：30~60 公斤 材質：polyester 承載重量：至少 200 公斤</p> <p>三、使用前需注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 移位機是否組裝好2. 各種相關配件是否在正確位置3. 電池是否已充足至少 6 小時4. 是否知道各種配備的使用方法5. 選擇適合被照顧者的配件 <p>四、使用時需注意事項：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 各種配件沒有損壞2. 配件正確放置在被照顧者身上3. 在往上升起被照顧者前需再一次確定吊環是否牢固、確實放入環扣裡4. 不可以單獨將被照顧者留置於上昇狀態的移位機上
------	-----	--	--

圖片來源：Liko 網站